



3 SLOJA



BFE 99%



LAKOĆA  
DISANJA



ODBOJNOST  
NA KAPLJICE

*Nisu sve maske iste.*

**SimpleMask**

**PROTECT 3S**

Troslojne kirurške maske **Tip IIR** s visokim stupnjem zaštite i bakterijskom filtracijom **BFE 99%** proizvedene u EU, prema strogim zahtjevima standarda EN 14683 o medicinskim kirurškim maskama i ISO 13485 o medicinskim proizvodima.

**SimpleMask**  
**PROTECT 3S**

## SIGURNA I UČINKOVITA ZAŠTITA UZ SIMPLEMASK ZAŠTITNE MASKE


**SimpleMask** zaštitne maske namijenjene su za kirurško i medicinsko osoblje s visokim stupnjem rizika od zaraze putem tjelesnih tekućina i čestica koje se prenose zrakom tijekom izvođenja specifičnih medicinskih zahvata.



Potencijalno infektivnih tvari koje se prenose zrakom



Tjelesnih tekućina krvi i sline

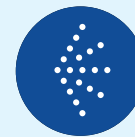

Čestica koje se prenose zrakom

## PROVJERENI MATERIJALI I KVALITETA IZRADE NA PRVOM MJESTU

Ugrađen **adaptivni držač za nos** pruža sigurno prijanjanje i udobnost tijekom nošenja.

Izrađane od kvalitetnih **netkanih hipolarenih** materijala koji osiguravaju optimalnu prozračnost i filtraciju.

Mekane i čvrste, s **ultrazvučno varenim** gubicama za uši pričvršćene s vanjske strane maske kako bi se spriječilo nadraživanje lica, te omogućilo lakše skidanje uz minimalni rizik od samokontaminacije.

**Vanjski sloj otporan na tekućine**  
Netkani materijal učinkovito filtrira velike čestice i smanjuje prodor tjelesnih tekućina i ostalih onečišćenja

**Srednji sloj - Filter**  
Učinkovito filtrira sitna onečišćenja i infektivne mikročestice

**Unutarnji sloj - Skin Friendly**

Mekani netkani materijal apsorbira vlagu kako bi održavao kožu suhom i pružao ugodnost pri uporabi

Kako bi **SimpleMask** zaštitne maske dobile status najvišeg stupnja zaštite prilikom uporabe u medicinskom okruženju moraju zadovoljiti stroge kriterije EN 14683 standarda. Performanse medicinskih maski za lice testiraju se za slijedeća 4 kriterija:

EN 14683 OBVEZNI ZAHTJEVI I METODE TESTIRANJA	Tip I	Tip II	Tip IIR
<b>SimpleMono maske</b>			<b>SimpleMask Protect 3S</b>
Učinkovitost bakterijske filtracije BFE%	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
Diferencijalni tlak (Pa/cm <sup>2</sup> )	40 Pa/cm <sup>2</sup>	40 Pa/cm <sup>2</sup>	60 Pa/cm <sup>2</sup>
Otpornost na prskanje, sintetička krv (kPa)	Nije obavezno	Nije obavezno	16,0 kPa (>120 mmHg)
Mikrobna čistoća (cfu/g) ISO 11737-1	≤30	≤30	≤30

Dostupne u 5 boja.

Pakiranje: 50 maski u kutiji.



15905 - plava      15907 - lavanda      15909 - crna  
15908 - zelena      15906 - roza



SimpleMono linija proizvoda za jednokratnu uporabu privatna je marka tvrtke Apolonia d.o.o. - Hrvatska  
[www.apolonia.hr](http://www.apolonia.hr) • [webshop.apolonia.hr](http://webshop.apolonia.hr)

apolonia

